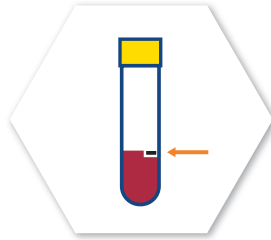


**Stap 1:**  
Start


- Haal de 4 buisjes uit het doosje.

**Stap 2:**  
Afname


- Vul de 4 buisjes ieder met 1 ml veneus bloed.
- **Belangrijk:** Zorg dat de buisjes gevuld worden tot op de zwarte markering van het buisje.
- **Let op:** Hou het buisje 2-3 seconden op de naald, ook als deze voldoende gevuld lijkt te zijn.

**Stap 3:**  
Identificatie afnamemateriaal


- Meng de buisjes 10 maal door ze zonder veel kracht te kantelen. Laat het bloed hierbij voldoende contact maken met de binnenkant van het buisje.
- Vermijd bij het mengen dat de gel desintegreert.

- Vul op de buisjes de datum en tijdstip van afname in en controleer deze goed.

**Stap 4:**  
Verzendklaar maken en verzenden


- Plaats de buisjes terug in het doosje.



- Plaats het doosje met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.

**Belangrijk**

- Afname van de IGRA test kan **ALLEEN** plaatsvinden als de buisjes binnen 16 uur op het MML aanwezig kunnen zijn. De buisjes moeten na afname zo snel mogelijk op transport worden gezet.
- Afname kan alleen plaatsvinden op de dag dat de koerier de afnamematerialen komt ophalen.
- Afname kan plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen kantooruren.
- Bewaar de buisjes na het mengen op kamertemperatuur (**NIET** in de koelkast).