


Instructie Ooguitstrijk (D)

Stap 1a: Afname



- Desinfecteer voor het afnemen de handen en draag handschoenen tijdens de afname.
- Trek voorzichtig het onderste ooglid naar beneden en strijk van binnen naar buiten over de conjunctiva (overgang tussen oog en oog lid).
- Noteer de afnamelocatie, wanneer er van beide ogen een uitstrijk afgenomen wordt.

Stap 1b: Afname

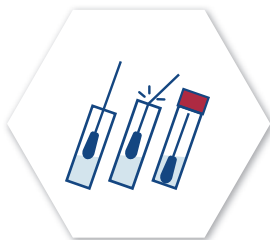

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 2: Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 3: Transport



- Plaats de afnamebuis in een safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Alrijne Leiden

- Route 69 Klinische Chemie
- Route 92 Medische Microbiologie

Alrijne Alphen

- Route 32 Klinische Chemie

Alrijne Leiderdorp

- Route 190 Klinische Chemie