

Instructie Nasopharyngealswab (E)

Stap 1: Afname



- Neem materiaal af uit de nasofarynx met behulp van de flexibele eswab.
- Breng de swab over de neusbodem tot in de nasopharynx en draai die voorzichtig om zijn as.

Stap 2: Identificatie afnamebuis



- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3: Transport



- Plaats de afnamebuis in de safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Alrijne Leiden

- Route 69 Klinische Chemie
- Route 92 Medische Microbiologie

Alrijne Alphen

- Route 32 Klinische Chemie

Alrijne Leiderdorp

- Route 190 Klinische Chemie