



Instructie Overig (C)

Stap 1: Start

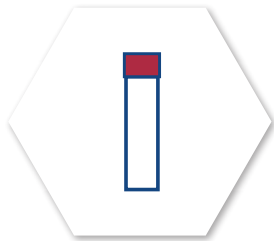

- Gebruik voor deze afname de steriele container.
- Deze container is geschikt voor bijvoorbeeld sputum en punctaten.

Stap 2: Afname

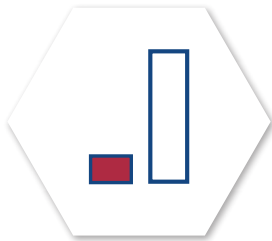

- Doe het materiaal in de container.

Stap 3: Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 4: Transport



- Plaats de container in een safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Alrijne Leiden

- Route 69 Klinische Chemie
- Route 92 Medische Microbiologie

Alrijne Alphen

- Route 32 Klinische Chemie

Alrijne Leiderdorp

- Route 190 Klinische Chemie