


Instructie SOA mannenset (G)

Stap 1: Start



- Open de verpakking.
- Haal de pipet en het buisje er uit.

Stap 2: Afname

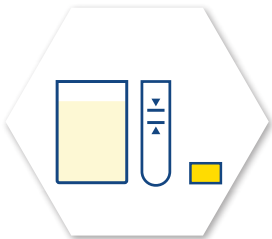

- Neem bij voorkeur het eerste gedeelte van de ochtendurine af. (U mag minimaal 2 uur daarvoor niet geürineerd hebben.)
- Vang vervolgens het eerste gedeelte van de urine op in een schone beker. U kunt daarna uitplassen in de WC.
- Draai de dop van de bijgeleverde buis. **(PAS OP: er zit vloeistof in.)**

Stap 3: Buisje vullen



- Breng met de pipet urine uit het potje over in het buisje met de transportvloeistof.
- Vul het buisje met urine tot dat de vloeistof tussen de strepen zichtbaar is.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

Stap 4: Identificatie afnamebuis



- Vul de patiëntgegevens en datum van afname in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afnamebuis.

Stap 5: Transport



- Plaats de afnamebuis in een safetybag. Sluit deze door de plakstrip te verwijderen.

Breng het afnamemateriaal zo snel mogelijk naar de balie van Medische Microbiologie of Klinische Chemie.

Alrijne Leiden

- Route 69 Klinische Chemie
- Route 92 Medische Microbiologie

Alrijne Alphen

- Route 32 Klinische Chemie

Alrijne Leiderdorp

- Route 190 Klinische Chemie