



► Overzichtsfolder afnamematerialen



Urine set

Klinische Chemie

Urinepotje:

1. Diagnostiek witte dop:
2. Diagnostiek geel/rode dop:
3. Diagnostiek geel/gele dop:

Let op:

Temp. tot transport:

Verzendinstructie:

Voor het verzamelen van urine.

Albumine in urine + ACR; Chemie.

Dysmorfe ery's en celcilinders.

Urine strip.

Vul de buis altijd binnen 1 uur na productie van de urine.

Het urinepotje kan worden weggegooid. Bepaling voor dysmorfe ery's moet binnen 2 uur na productie geanalyseerd zijn. Afname vindt bij voorkeur plaats op een laboratoriumlocatie.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (m.u.v. bepaling dysmorfe ery's).



Feces Calprotectine en iFOBT

Klinische Chemie

Diagnostiek:

Let op:

Temp. tot transport:

Verzendinstructie:

iFOBT (Occult bloed) en Calprotectine.

Buisje niet meer openen nadat het staafje met de feces in de vloeistof is gedaan.

Kamertemperatuur.

Op de dag van productie/verzamenen inleveren bij laboratorium/afnamepunt of brievenbus.



Urine set

Medische Microbiologie

Urinepotje:

Diagnostiek geel/zwarte dop:

Let op:

Temp. tot transport:

Verzendinstructie:

Voor het verzamelen van urine.

Kweek op bacteriën en gisten.

Midstream urine opvangen volgens afname instructie.

2-8°C.

Voor MMB Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Feces microbiologie

Medische Microbiologie

Diagnostiek:

Let op:

Temp. tot transport:

Verzendinstructie:

Bacteriën (Kweek/PCR), virussen (PCR) en parasieten (microscopie/PCR).

Potje voor driekwart vullen en draai de dop goed dicht.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post*. Aanvraag onderzoek Helicobacter pylori moet op de dag van afname worden ingeleverd bij een laboratorium/afnamepunt, mag niet per post.



SOA Urine / Moleculaire diagnostiek

Medische Microbiologie

Diagnostiek:

Let op:

Temp. tot transport:

Verzendinstructie:

PCR op Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis.

Deze set is alleen geschikt voor diagnostiek bij mannen.

Vul het buisje met eerste straal urine tot tussen de aangegeven vullijnen (circa 4 ml).

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



SOA Swab / Moleculaire diagnostiek

Medische Microbiologie

- Diagnostiek:** PCR op Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis.
Geschikt voor afname in vagina, keel of anus.
- Let op:** Keeluitstrijk: niet zinvol om Trichomonas vaginalis en Mycoplasma genitalium op te bepalen.
- Temp. tot transport:** 2-8°C.
- Verzendinginstructie:** Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Uitstrijk

Medische Microbiologie

- Diagnostiek:** Kweek op bacteriën (incl. BRMO), gisten/schimmels en PCR op virussen en bacteriën.
- Let op:** Swab afbreken op afbreekpunt.
- Temp. tot transport:** 2-8°C. **Let op:** kweek voor Neisseria gonorrhoeae niet in koelkast bewaren en zo snel mogelijk naar het lab brengen.
- Verzendinginstructie:** Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Nasopharynx-swab

Medische Microbiologie

- Diagnostiek:** Geschikt voor gebruik bij kinderen. PCR op respiratoire virussen en Bordetella pertusis (Kinkhoest).
- Let op:** Swab afbreken op afbreekpunt.
- Temp. tot transport:** 2-8°C.
- Verzendinginstructie:** Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



MRSA set

Medische Microbiologie

- Diagnostiek:** MRSA (Keel, Neus & Perineum).
- Let op:** Bij screening na bezoek buitenlands ziekenhuis, ook extra rectumuitstrijk insturen voor BRMO.
Bij screening op MRSA: indien er wonden of catheter aanwezig zijn, tevens wonduitstrijk en/of urinekweek insturen.
- Temp. tot transport:** 2-8°C.
- Verzendinginstructie:** Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Steriele container

Universeel

- Afnamemateriaal:** Bijvoorbeeld nagel, sputum, punctaten.
- Diagnostiek:** Kweek op bacterien, gisten/schimmels en/of PCR op virussen en bacterien.
- Temp. tot transport:** 2-8°C.
- Verzendinginstructie:** Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Breder potje vanuit koerierskit kan ook gebruikt worden.

Cervixcytologie indicatief

Pathologie

Diagnostiek:

Indicatieve Cervixcytologie en Humaan Papillomavirus. Voor deze afname kan ook het bredere potje uit de koerierskit gebruikt worden.

Let op:

Deze afnameset NIET gebruiken voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

Temp. transport:

2-30°C.

Verzendinstructie:

Verzenden op dag van afname via de logistieke dienst of via inleverlocatie (voorkeur) of versturen per post* bij gebruik van het smalle potje (afbeelding).



Histologie

Pathologie

Diagnostiek:

Weefsel ten behoeve van pathologie.

Let op:

Een biopt per potje. De potjes van één patiënt samen in één verzendenvelop. Enkel geschikt voor klein materiaal. Grotere potten zijn op aanvraag beschikbaar.

Temp. transport:

Kamertemperatuur.

Verzendinstructie:

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post* bij gebruik van het smalle potje (afbeelding).



Histologie huidstans (diverse maten)

Pathologie

Diagnostiek:

Disposable huidstans voor het eenvoudig afnemen van huidmonsters en klein weefsel. Steriel per stuk verpakt.

Vragen?

Eurofins Clinical Diagnostics

Visseringlaan 24K

2288 ER Rijswijk

088 - 235 02 00

Locaties laboratoria en afnamelocaties:

www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl

Medische Microbiologie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **088 - 4500 821**

Buiten kantooruren: **071 - 5178 178**

(U kunt vragen naar de dienstdoende arts-microbioloog)

Klinische Chemie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **071 - 516 00 22**

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 uur

Een CITO aanvragen kan op werkdagen van 08.00 - 15.00 uur

Pathologie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **088 - 235 02 35**

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 uur

Locaties laboratoria & afname- en inleverlocaties

www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl/locaties

Ondanks dat wij met zorg dit overzicht hebben opgesteld, kunnen er zich altijd wijzigingen voordoen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van de versie op de website of controleer of uw versie de meest actuele is. Indien gewenst kunt u altijd een nieuwe kaart bestellen wanneer uw versie verouderd is. Eurofins Clinical Diagnostics accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie of van een verouderde versie. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag door naar ons vademecum op www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl/vademecum

*Door oncontroleerbare omstandigheden kan verzending per post ten koste gaan van de kwaliteit. In het weekend en op feestdagen kunt u medische post in de speciale brievenbus doen voor medisch materiaal. Deze wordt ook op zondag geleverd. In deze locatiewijzer ziet u waar u deze brievenbussen vindt: <https://www.postnl.nl/locatiewijzer/>. Filter op 'Brief posten' en kies voor 'Medisch'. Laat u patiënten diagnostisch materiaal versturen? Vertel dan welke brievenbus ze kunnen gebruiken.